


star**PRO**tect-shield UP lässt sich einfach an ihre Optik von ZEISS oder Swarovski montieren.

1. Sollten Sie einen Adapter von star**Med** für das star**Light** besitzen, dann verwenden Sie die zwei langen Schrauben (A). Wenn Sie keinen Adapter verwenden, nehmen Sie die zwei kurzen Schrauben (B).

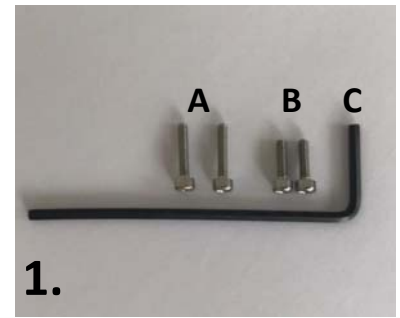

2. Beide Schrauben werden durch den Adapter (falls vorhanden) und durch den Schildhaltebügel geführt. Schrauben mit dem Sechskantenschlüssel (C) an dem Keplersystem mit Gefühl befestigen, bis ein fester Halt erreicht ist (Vorsicht vor Überdrehungsgefahr).



3. An der unteren Rändelmutter (D) kann das Schild unabhängig vom Supporter in seiner Neigung angepasst werden 0-90°. Diese Funktion ist erforderlich zum Einstellen der Lupe. Nach optimaler Einstellung der Lupe, wird das Schild in die gewünschte Neigung zurückgestellt und mit Hilfe der beiden Rändelmutter (D) fixiert.



4. Unabhängig von der voreingestellten Neigung der Scheibe ist das komplette System wie gewohnt hoch und runter klappbar (Flip-Up)



Vertrieb durch star**Med** GmbH & Co. KG
Call 08092 - 850 447
Mail to: info@starmed-technik.de