


star**PRO**tect-shield lässt sich einfach an ihre Brille mit Sehstärke, eine Schutzbrille oder handelsübliche Brille montieren.

1. Brille in die Innenseite des Schilds bringen und den Bügel unterhalb der Gummibandlasche halten.



1.

2. Jetzt die Gummibandlasche über den Bügel nach unten legen und die Gummibandlasche durch den unteren Schlitz nach außen durchführen.

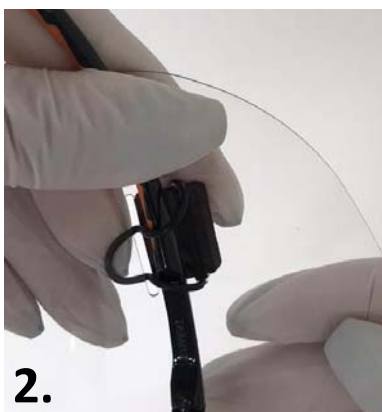

2.

3. Durchgeführte Gummibandlasche außen spannen und über das schwarze Rechteck ziehen.



3.

4. Schritt 1 bis 4 auf der anderen Seite wiederholen.



4.

5. Befestigungen, durch Verschieben der Gummibandlasche, auf gleiche Höhe positionieren und den Abstand zwischen Schild und Gesicht anpassen.




5.

6. Zugband über die Bügelenden 3 bis 4cm aufschieben.



6.

7. Brille mit star**PRO**tect-shield aufsetzen und Zugband mit Hilfe der Feststellkugel am Hinterkopf fixieren.

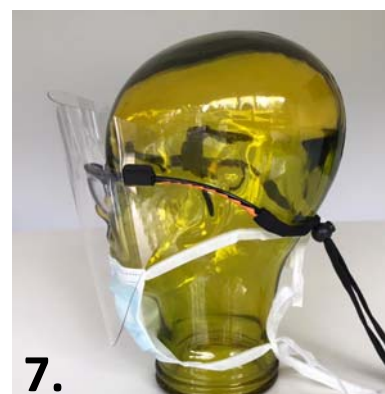

7.

Vertrieb durch star**Med** GmbH & Co. KG
Call 08092 - 850 447
Mail to: info@starmed-technik.de