

# starMed PROtect-shield

Gesichtsspritzschutz für Brillen und Lupensysteme

Achten sie bitte darauf, dass die Außenseite des Schildes vor Verkratzungen geschützt wird. Legen sie das Schild immer wie auf Bild(7) dargestellt ab. **Nicht wie in Bild (8).**  
Die runde Kante des Schildes ist **OBEN** Bild (1).

Montieren sie das Schild links und rechts an ihren Brillenbügel mit den vormontierten Klemmadaptern Bild (3, 4). Beginnen sie falls vorhanden mit der Kabelkanalseite. Der Kabelkanal sollte zwischen der Aussparung der Klemmschale positioniert sein Bild (6 + 10). Hierzu den Klemmadapter zerlegen Bild (3 +3a). Lockern sie die Rändelschraube soweit, dass der Brillenbügel eingefädelt werden kann Bild (5).

Wenn beide Seiten an den Brillenbügeln montiert sind, achten sie auf eine symmetrische gegenüberliegende Positionierung der Klemmschalen Bild (10). Prüfen sie vor dem Fixieren, das der Freiraum bei runtergeklapptem Schild ausreichend für ihr Lupensystem ist. Wenn nicht, können sie mittels der seitlichen 3 Löcher im Schild die Drehachse verändern Bild (9).

Richtige Achse eingestellt, dann fixieren sie das Schild mit Hilfe der beiden Rändelschrauben. Nun können sie die Lupenbrille mit dem **PRO**tect-shield aufsetzen und auf- und abklappen Bild (1 + 2)

**! Benutzen sie zum Schild immer einen Mundschutz !**

**Beachten sie die Reinigungs- und Desinfektionsanleitung  
Auf der Rückseite – DANKE. PAT.pending**

Support unter +49 (0) 8092 – 850 447

starMed GmbH & Co. KG  
Am Schammacher Feld 19  
85567 Grafing bei München  
[www.starmed-technik.de](http://www.starmed-technik.de)  
[info@starmed-technik.de](mailto:info@starmed-technik.de)

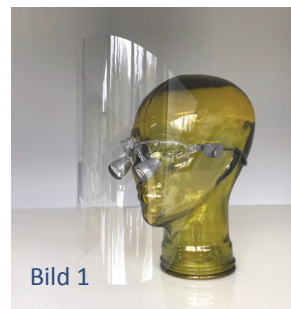


Bild 1



Bild 2

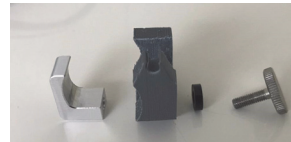


Bild 3



Bild 3a



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

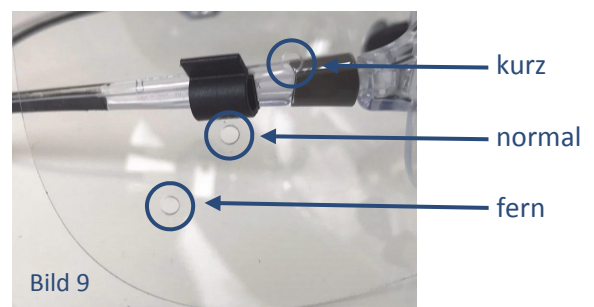


Bild 9

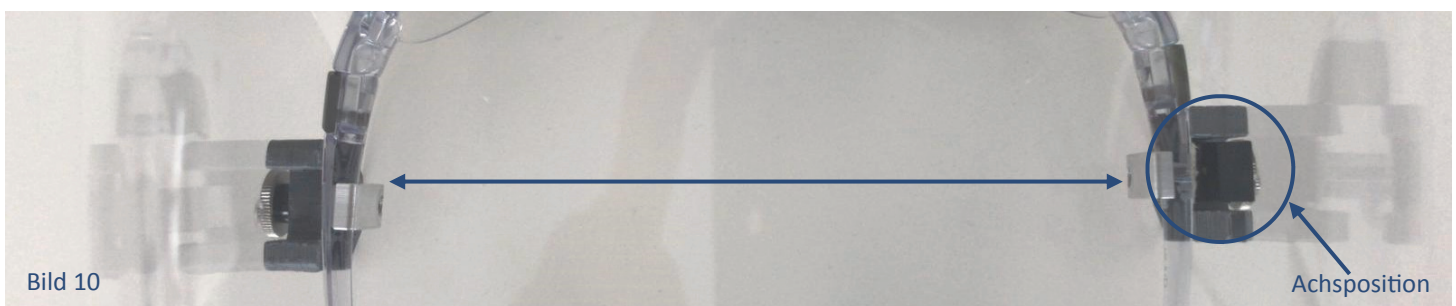


Bild 10

Achspannung



## starMed PROtect-shield Reinigungs und Desinfektionsanleitung

PROtect-shield von starMed hat eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Staub und/oder Schmutz wird mit fließendem Wasser, weichem Tuch oder Schwamm entfernt.

**NIEMALS trocken abreiben oder wischen (Verkratzungsgefahr).**

### Reinigung

- Schild von der Lupenbrille abmontieren
- Schild unter fließendem Wasser ohne Hilfsmittel abspülen
- Spülmittel mit Hand oder weichem Tuch auf der Scheibe auftragen
- hartnäckige Verschmutzungen einweichen lassen (nicht kratzen)
- Spülmittel unter fließendem Wasser abspülen / klarspülen
- Scheibe mit weichem Tuch (kein Papier) abtrocknen
- bei Bedarf kann mit der Desinfektion laut Anweisung begonnen werden

### Desinfektion mit alkoholfreiem Desinfektionsmittel/-tücher

- Scheibe vorher reinigen laut Anweisung
- alkoholfreie Desinfektion aufsprühen oder
- mit alkoholfreien Desinfektionstücher Scheibe vollständig benetzen
- Einwirkzeit laut Hersteller beachten
- Scheibe klarspülen und Desinfektionsmittel abspülen
- Scheibe mit Mikrofaser Tuch (kein Papier) abtrocknen oder abblasen